

Anvisningar för provtagningsset urinprov, frivård och häkte

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
Ett set innehåller: 1 provrör
1 transportpåse med absorbent
1 bägare med temperaturindikator
1 platspipett
etiketter för provID
1 svarskuvert
2. Märk upp provrör, bägare och utskriften ”Sammanställning” med de etiketter som finns i provtagningssetet. Det är viktigt att etiketten på röret sitter som bilden visar.
3. Låt provlämnaren tvättar händerna noga utan tvål. Provlämnaren får inte bära ringar eller armband.
4. Ge bägaren till provlämnaren, som under övervakning lämnar urin. Provlämnare som har svårt att lämna urin, kan få dricka ett stort glas vatten (max 5 dl) för att underlätta provtagningen.
5. Kontrollera inom 4 minuter att indikatorn på bägaren visar en temperatur mellan 33-38 °C. Om temperaturen inte ligger inom angivet intervall, bör provet underkännas.
6. Överför urinen från bägaren till provröret med plastpipetten till ca 1 cm från kanten.
7. Förslut provröret ordentligt, så att urinen inte läcker ut.
8. Lägg provröret i transportpåsen i facket med absorbent (vitt material).
9. Dra bort skyddet på den självhäftande tejpens och förslut påsen vid markeringen.
10. Lägg transportpåsen i svarskuvertet med rättskemis förtryckta adress.
11. Försegla kuvertet noga. Tänk på att inte lägga kuvertet i en postlåda om det är minusgrader ute. Urinen riskerar då att frysa och spräcka röret. Lämna helst kuvertet på ett postkontor.

