

Anvisningar för provtagningsmaterial urinprov, frivård och häkte

Nedan följer anvisningar för vårt provtagningsmaterial. Ytterligare beskrivning av hela provtagningskedjan (hur lokalen ska vara utformad, utbildning, manipulation mm) går att läsa i manualen "Information om hantering av drogtestar inom Kriminalvården". Manualen finns på Krimnet.

Observera att provtagaren alltid ska använda skyddshandskar vid hantering av urin.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
Ett set innehåller: 1 provrör,
1 transportpåse med absorbent
1 bägare med temperaturindikator
1 plastpipett
etiketter med provID
1 svarskuvert
2. Märk upp provrör, bägare och utskriften "Sammanställning" från registreringen i KVR med de etiketter som finns i provtagningssetet. Det är viktigt att etiketten på röret sitter som bilden till höger visar.
3. Provlämnaren ska avlägsna ringar, armband och skrymmande klädesplagg.
4. Provlämnaren ska tvätta händerna noga med enbart vatten.
5. Ge bägaren till provlämnaren, som under övervakning lämnar urin. Provlämnare som har svårt att lämna urin, kan få dricka ett glas vatten (max 5 dl) för att underlätta provtagningen.
6. Kontrollera urinens färg. Ser urinen ut som vatten bör provet underkännas och ett nytt prov tas så snart som möjligt.
7. Kontrollera inom 4 minuter att indikatorn på bägaren visar en temperatur mellan 33-38 °C. Om temperaturen inte ligger inom angivet intervall, ska provet underkännas.



8. Överför urinen från bägaren till provröret med plastpipetten. Provröret ska fyllas upp till en cm från kanten.



9. Förslut provröret ordentligt, så att urinen inte läcker ut.



10. Lägg provröret i transportpåsen i facket med absorbent (vitt filtmaterial).

11. Dra bort skyddet på den självhäftande tejpens och förslut påsen vid markeringen.

12. Lägg transportpåsen i svarskuvertet med rättskemis förtryckta adress.

13. Försegla kuvertet noga.

14. Provet förvaras i kylskåp i låst utrymme fram till transport.

15. Lämna alltid kuvertet till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg, eftersom laboratoriet är stängt på helger.