

Anvisningar för provtagningsset urinprov, Kriminalvården

Ärendet registreras i KVR. Scanna alltid in numret på streckkodsetiketten. Om provtagningen sker där tillgång till KVR saknas, kan ärendet registreras både innan provtagningen utförs eller i efterhand. Kom ihåg att skicka remissen i god tid, så att den finns hos rättskemi när provröret inkommer till laboratoriet.

Beskrivning av hela provtagningskedjan finns i manualen ”Information om hantering av drogtester inom Kriminalvården”. Manualen finns på Krimnet.

Observera att provtagaren alltid ska använda skyddshandskar vid hantering av urin.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
Ett set innehåller: 1 urinprovsrör,
1 transportask
1 bägare med temperaturkontroll
1 plastpipett
etiketter med provID-nummer
1 svarskuvert (blått i polyten)

2. Märk upp provrör, bägare och utskriften ”Sammanställning” från registreringen i KVR med de etiketter som finns i provtagningssetet.

Det är viktigt att etiketten på röret sitter som bilden till höger visar.

Numret på etiketten blir ärendets provID-nummer och är den providentitet som uppges vid kontakt med RMV.



3. Provlämnaren ska avlägsna ringar, armband och skyddande klädesplagg.
4. Provlämnaren ska tvätta händerna noga med enbart vatten.
5. Ge bägaren till provlämnaren, som under övervakning lämnar urin. Provlämnare som har svårt att lämna urin, kan dricka ett glas vatten (max 5 dl) för att underlätta provtagningen.

6. Kontrollera urinens färg. Ser urinen ut som vatten bör provet underkännas och ett nytt prov tas så snart som möjligt.

7. Kontrollera inom 4 minuter att indikatorn på bägaren visar en temperatur mellan 33-38 °C. Om temperaturen inte ligger inom angivet intervall, ska provet underkännas.




8. Överför urinen från bägaren till provröret med plastpipetten. Provröret ska fyllas upp till en cm från kanten.



9. Skruva åt korken ordentligt på provröret så att urinen inte kan läcka ut.

10. Lägg provröret i transportasken.
Se till att plastpåsens öppning hamnar i förslutningen.

Stäng asken.

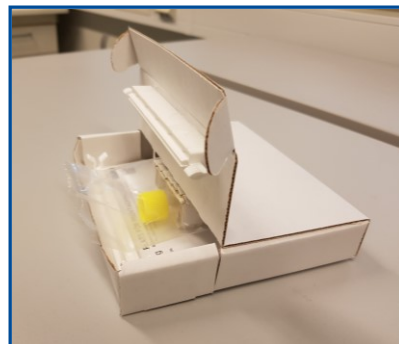

11. Lägg transportasken i svarskuvertet och försegla noga.

12. Provet förvaras i kylskåp i låst utrymme fram till transport.

13. Lämna alltid svarskuvertet till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg eftersom laboratoriet är stängt på helger.