
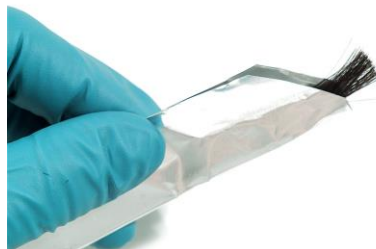


Instruktion för hårprovtagning

Provtagaren ska använda engångshandskar samt en ren sax vid provtagning för att undvika kontaminering av hårprovet. Provtagningskit samt remiss från rättskemi ska alltid användas.

1. Kamma bort lösa hår från bakre delen av provlämnarens huvud. Frigör en hårlock som är ca 1 cm bred vid rotändan.
2. Håll ett stadigt tag om locken och klipp av håret alldeles intill hårbotten.
3. Lägg locken i en av folierna så att ca 5 mm av hårets rotända sticker ut från foliens avfasade del.
4. Upprepa punkt 1-3 ytterligare två gånger. Totalt ska det bli tre folier med varsin hårlock.
5. Vik varje folie ordentligt längs med långsidan för att fixera provet. Lägg tillbaka folierna i provtagningskuvertet.
6. Ange provlämnarens identitet samt provtagningsdatum på provtagningskuvertet. Provtagaren signerar på provtagningskuvertet.
7. Posta provtagningskuvertet tillsammans med ifylld remiss för droganalys hår i ett vanligt kuvert till:

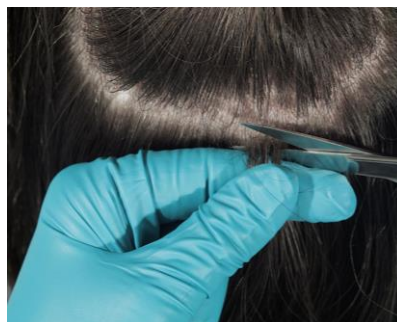

Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Box 1531
581 15 Linköping