

Anvisningar för provtagningsmaterial blodprov, Kriminalvården

Ärenden med blodprov ska hanteras på samma sätt som urinprov i KVR. Scanna alltid in numret på streckkodsetiketten. Om provtagningen sker där tillgång till KVR saknas, kan ärendet registreras både innan provtagningen utförs eller i efterhand. Kom ihåg att skicka remissen i god tid, så att den finns hos rättskemi när provröret inkommer till laboratoriet.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
Ett set innehåller: 2 st provrör (preparerade med natriumheparin och natriumfluorid)
2 st transporthylsor
1 kanyl
1 hållare
streckkodsetiketter
1 svarskuvert (grönt)

2. Märk båda provrören med streckkodsetiketter som bilden visar. Numret är ärendets provID.



3. Fyll båda provrören ordentligt. Det krävs minst 8 ml blod för att materialet ska räcka till screeninganalyser och eventuella verifikationsanalyser.
4. Blanda rören väl genom att vända dem långsamt, minst 10 gånger.
5. Lägg provrören i transporthylsorna och skruva åt korkarna väl.
6. Lägg transporthylsorna med provrören i kuvertet och försegla det noga.
7. Provet ska förvaras i kylskåp i låst utrymme fram till dess att det skickas till rättskemi.
8. Lämna alltid kuvertet till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg, eftersom laboratoriet är stängt på helger.