


Anvisningar för provtagningsset blodprov, Kriminalvården

Ärendet registreras i KVR. Scanna alltid in numret på streckkodsetiketten. Om provtagningen sker där tillgång till KVR saknas, kan ärendet registreras både innan provtagningen utförs eller i efterhand.

Kom ihåg att skicka remissen i god tid, så att den finns hos rättskemi när provröret inkommer till laboratoriet.


Beskrivning av hela provtagningskedjan finns i manualen ”Information om hantering av drogtester inom Kriminalvården”. Manualen finns på Krimnet.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
2. Notera provtagningsdatum och providentitet (provID), inskrivningsnummer eller klientID, på streckkodsetiketten. Namn eller personnummer får inte användas.
3. Märk båda provrören med streckkodsetiketterna som bilden visar. Numret på etiketten blir ärendets provkod på laboratoriet och är den uppgift som uppges vid kontakt med RMV.
4. Fyll båda provrören ordentligt. Det krävs 6 ml blod för att materialet ska räcka till både screeninganalyser och eventuella verifikationsanalyser.
5. Blanda rören väl genom att vända dem långsamt, minst 10 ggr.
6. Lägg provrören i transportasken. Se till att plastpåsens öppning hamnar i förslutningen.

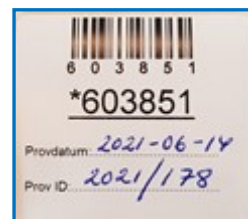

7. Stäng asken.

8. Fyll i etiketterna på både transportasken och det blå kuvertet med avsändare och kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att provet är packat på rätt sätt.

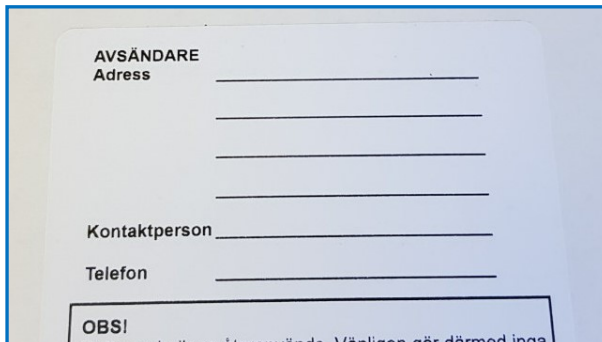

AVSÄNDARE
Adress _____

Kontaktperson _____
Telefon _____

OBS!
Dette emballage återanvänds. Vänligen gör därmed inga

9. Lägg transportasken i kuvertet och försegla noga.

10. Provet ska förvaras i kylskåp i låst utrymme fram till dess att det skickas till rättskemi.

11. Lämna alltid försändelsen till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg.