


## **Anvisningar för provtagningsmaterial blodprov, sjukvård m.fl.**

Rättsmedicinalverket kan tillhandahålla provtagningsmaterial och remiss. Blankett för beställning av provtagningsmaterial finns på [rmv.se](http://rmv.se) och där finns även vår remiss för drogkontroll.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.

Ett set innehåller: 2 st provrör (preparerade med natriumheparin och natriumfluorid)  
2 st transporthylsor  
1 kanyl  
1 hållare  
strekkodsetiketter  
1 svarskuvert grönt

2. Märk båda provrören med strekkodsetiketter som bilden visar. Numret är ärendets provID.

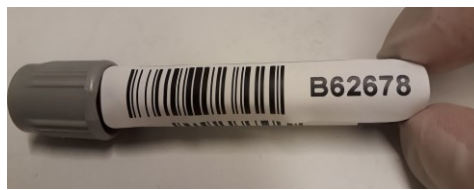

3. Fyll båda provrören ordentligt. Det krävs minst 8 ml blod för att materialet ska räckta till screeninganalyser och eventuella verifikationsanalyser.
4. Blanda rören väl genom att vända dem långsamt, minst 10 gånger.
5. Lägg provrören i transporthylsorna och skruva åt korkarna väl.
6. Lägg transporthylsorna med provrören i kuvertet och försegla det noga.
7. Provet ska förvaras i kylskåp fram till dess att det skickas till rättskemi.
8. lämna alltid kuvertet till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg, eftersom laboratoriet är stängt på helger.