

Anvisningar för provtagningsmaterial blodprov, sjukvård m.fl.

Rättskemi tillhandahåller provtagningsmaterial som underlättar för uppdragsgivaren att utföra en kvalitetssäker provtagning. Provtagningsmaterial beställs på www.rmv.se. På www.rmv.se finns även remiss för drogkontroll. En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
Ett provtagningsset för blod innehåller:
3 st. provrör
1 st. transportask
1 st. provtagningskanyl
1 st. hållare till provtagningskanyl
streckkodsetiketter
1 st. svarskuvert


2. Märk samtliga provrör med streckodsetiketter, se bild. Numret är ärendets providentitet.



3. Fyll provrören ordentligt. Det krävs minst 8 ml blod för att provmaterialet ska räcka till screeninganalyser och eventuella verifikationsanalyser.
4. Blanda provrören väl genom att vända dem långsamt, minst 10 gånger.
5. Förvara provrören i kylskåp fram till att de skickas till rättskemi.
6. Lägg provrören i transportasken, se bild.



7. Fyll i avsändarens namn och adress samt ansvarig person och telefonnummer till denna på etiketten som finns på transportasken och svarskuvertet, se bild.

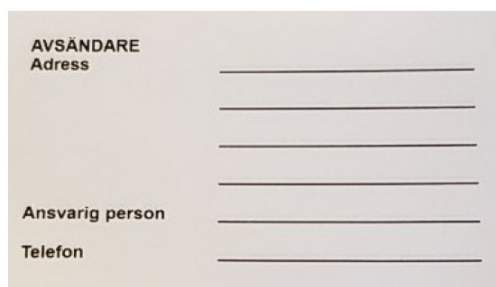

AVSÄNDARE
Adress _____

Ansvarig person _____
Telefon _____

8. Lägg transportasken med provrören samt remissen i svarskuvertet och försegla det noga.

9. Lämna alltid försändelsen till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg eftersom laboratoriet har stängt på helger.