



Anvisningar för provtagningsmaterial blodprov, sjukvård m.fl.

Rättskemi tillhandahåller provtagningsmaterial som underlättar för uppdragsgivaren att utföra en kvalitetssäker provtagning. Provtagningsmaterial beställs på www.rmv.se. På www.rmv.se finns även remiss för drogkontroll. En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.

Ett provtagningsset för blod innehåller:

- 3 st. provrör
- 1 st. transportask
- 1 st. provtagningskanyl
- 1 st. hållare till provtagningskanyl
- 4 st. streckkodsetiketter
- 1 st. svarskuvert

2. Märk samtliga provrör samt remiss med streckkodsetikett, se bild. Numret är ärendets providentitet.



3. Fyll provrören ordentligt. Det krävs minst 8 ml blod för att provmaterialet ska räcka till screeninganalyser och eventuella verifikationsanalyser.
4. Blanda provrören väl genom att vända dem långsamt, minst 10 gånger.
5. Förvara provrören i kylskåp fram till att de skickas till rättskemi.
6. Lägg provrören i transportasken, se bild.





7. Fyll i etiketterna på både transportasken och svarskuvertet med avsändare och kontaktperson, se bild. Kontaktpersonen ansvarar för att försändelsen är packad på rätt sätt.

AVSÄNDARE	
Adress	
Ansvarig person	
Telefon	

8. Lägg transportasken med provrören samt remissen i svarskuvertet och försegla det noga.
9. Lämna alltid försändelsen till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan dag innan helg eftersom laboratoriet har stängt på helger.